



manuell

Lösungen für Aktivfahrer Pedalverlegung

elektrisch, hängend:

Ein zusätzliches Gaspedal wird links eingebaut. Welches Gaspedal aktiv ist, wird über einen Schalter am Armaturenbrett gesteuert. Dieser muss innerhalb von 30 Sekunden nach betätigen der Zündung gedrückt werden, ansonsten ist das Original-Gaspedal aktiv.

Ein Umschalten während der Fahrt ist nicht möglich. Die Zündung muss erst komplett ausgeschaltet werden, um erneut wählen zu können.

manuell, stehend:

Das Gaspedal wird über eine Stangenkonstruktion manuell nach links verlegt. Das Original-Gaspedal ist dabei durch eine Pedalabdeckung vor dem unbeabsichtigten Betätigen geschützt. Die Einheit ist auf dem Boden montiert, kann aber durch das Lösen einer Schraube komplett heraus genommen werden, so dass jede nicht behinderte Person das Fahrzeug ganz normal nutzen kann.



elektrisch

MobiTEC GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

www.mobi-tec.de